



# JPAD

## ジェイパッドCU-SP1

### オートボリューム（自動音量調整機能）

まわりの騒音にあわせ音声ガイダンスの音量が大きくなる

### モード切替【成人⇄小児】（セーフティガード付）

小学生以上は成人モード／未就学児（およそ6歳未満）は小児モード

### 3つのステータスインジケータ

①バッテリー残量表示 ②電極パッド期限表示 ③エラー状態表示

### CPR コーチング

的確なリズムと音声ガイダンスでサポート

**!** 日常点検を忘れずに！  
AEDは救命処置のための医療機器です。  
AEDを設置したら、いつでも使用できるように、  
AEDのインジケータや消耗品の有効期限などを  
日頃から点検することが重要です。



## 【ジェイパッドCU-SP1の使用法】

**1 電源ON・モード選択**

電源ボタンを押し、成人・小児モードを適切に切り替えます。

**2 衣服を脱がせる**

上半身の衣服を脱がせ胸をはだけます。

**3 電極パッドを貼る**

機器の底面にある電極パッドの袋を取り出し、袋を破いて電極パッドを取り出してください。示している図を確認してシートからはがし、図のように皮膚にしっかりと貼ってください。

**4 心電図解析中**

身体から離れてください。

**5 電気ショック**

指示が出ましたらオレンジ色で点滅する電気ショックボタンを押してください。

**6 CPR(心肺蘇生)**

直ちに胸骨圧迫を行ってください。できるなら人工呼吸も行ってください。

### 【構成】



### 【仕様】

販売名	ジェイパッドCU-SP1	メモリ機能	5件のデータ保存が可能(1件、3時間、最大15時間のイベント情報・ECG情報)PC転送(SDカード、赤外線通信)
電極	両用電極パッド(成人・小児、兼用 1回限りの使い捨て)	ガイド機能	3つのインジケータ(フラッシュライト機能付きイラスト表示)と、CPRコーチング機能
出力エネルギー	定格 150J (成人: 負荷 50Ωで公称 150J) 小児: 負荷 50Ωで公称 50J	モード切替	成人・小児モード切替スイッチ(セーフティガード付)
波形	二相性波形(e-cubv Biphasic) 波形パラメータは、傷病者の胸郭インピーダンスの負荷に応じて自動調整	ステータスインジケータ	3つのステータスが確認できるLCD画面 【電極パッド期限、バッテリー残量、機器のエラー状態】
バッテリー	DC12V 4.2A 長寿命使い捨てバッテリー(リチウムイオンLiMuO <sub>2</sub> バッテリー)	IP:55 (IEC60529)	粉塵が内部に侵入することを防止、いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない
バッテリー容量	スタンバイ状態5年以上、電気ショック200回以上	品番	SP1-JSP1
セルフテスト	毎日、毎週、4週毎、電源ON時、バッテリー装着時(バッテリー残量、電極パッド、内部回路、等)	医療機器承認番号	22500BZX00338A01
寸法・質量	260×256×69,5(W×L×Hmm)、2,4kg(バッテリー含む)	クラス分類	高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

【消耗品】			【オプション】	【収納ケース】		
電極パッド(両用)	電極パッド(小児用)	使い捨てバッテリーパック(長寿命型)	キャリングケース(JPAD CU-SP1用)	スタンダードボックスタイプ収納ケース	壁掛け収納ケース	卓上型収納ケース
SP1-OA04	SP1-OA05	SP1-OA03	SP1-JA01	ER1-SK-SD	ER1-SK-DM4	ER1-SK-DM5

※取扱説明書及び添付文書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
 ※仕様、外観等の一部が都合により変更されることがあります。あらかじめご了承ください。  
 ※AED設置の際は、AED管理者を設置し、製造販売業者の推奨する保守点検を行い、いつでも使用できる状態に管理してください。特に、電極パッド・バッテリーの使用期限の確認及び期間内の交換を確実に実施してください。  
 ※保守管理の必要性及び電極パッドやバッテリー等の消耗品の使用期限はそれぞれの本体にラベルを貼付しているため、確認してください。  
 ※AEDの設置管理者は、AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者に限る)、廃棄時には、日本CUメディカルシステム株式会社にご連絡ください。また、製造販売元又は販売元からの情報提供方法等(交換時期のお知らせ等)について確認してください。  
 ※未就学児(およそ6歳未満)の傷病者には、小児用除細動電極パッド(販売名: 除細動小児用パッドSPX用)を使用することを推奨するが、推奨する小児用パッドが近くにないなど、やむを得ない場合に限り、両用電極パッド(販売名: 除細動両用パッドSPX用)を使用してください。  
 ※両用パッドを未就学児に使用する場合には、特に2枚のパッドが触れ合うことがないように注意してください。  
 ※電極パッドは再使用禁止であり、1回限りの使い捨てです。

販売名: ジェイパッドCU-SP1 医療機器承認番号: 22500BZX00338A01  
 販売名: 除細動小児用パッドSPX用 医療機器届出番号: 13B1X1015300010  
 販売名: 除細動両用パッドSPX用 医療機器届出番号: 13B1X1015300009

製造元  
**株式会社 CU メディカルシステムズ**  
<http://www.cu911.com>

製造販売元  
**日本 CU メディカルシステム株式会社**  
 〒107-0062 東京都港区南青山 2-22-2  
 NOBIL 3階  
 TEL:03-6459-2322 FAX:03-6459-2218  
<http://www.japan-cu.com>

**AED コールセンター** ☎ **0120-910-256**