


「 生体情報検知型離床センサー 」

# おだやかタイム miNi

心拍・体動をセンサーマット内の空気を通じて検知。  
独自のアルゴリズムで離床を判断します。



ナースコールでスタッフにお知らせ。  
転倒を未然に防ぐお手伝いをします。

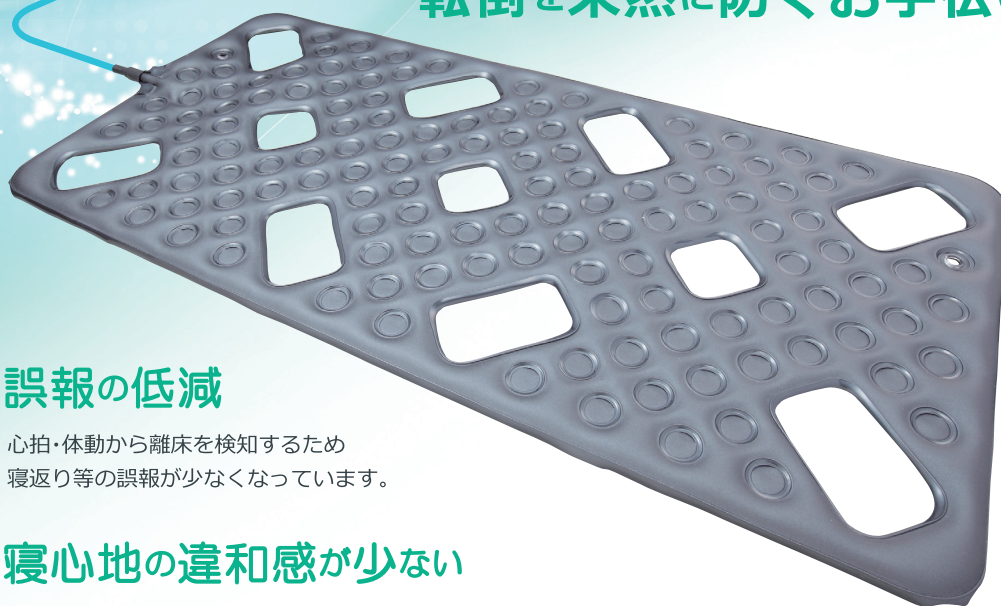

## 😊 誤報の低減

心拍・体動から離床を検知するため  
寝返り等の誤報が少なくなっています。

## 😊 寝心地の違和感が少ない

マットはPVC素材で最薄1.2mm、中身も空気のため  
体の下に敷いた時の違和感がほとんどありません。

## 😊 水洗いで衛生的

センサーマットには電気部品は使っていないため  
失禁や水濡れによる誤動作や故障の心配がありません。  
水洗いも可能です。

## 😊 選べる検知タイミング

1. 起き上がり

ベッドから  
起き上がると通知



2. 離床

ベッドから  
離床すると通知



## 😊 コンパクトに収納できる

マットの中身は空気なので自由に  
折り曲げて収納できます。


## 😊 一時停止ボタン搭載

介助などで一時的にナースコールを呼出したくない場合に、  
このボタンを長押しすると5分間、機能を停止できます。

本製品は医療機器ではありませんので  
医療行為には使用しないで下さい。

センサーマット

汗取りマットやシーツの下に敷いてご使用ください。

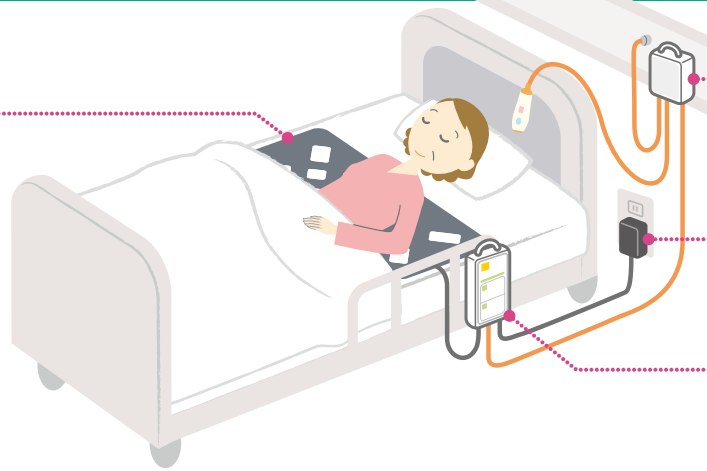

分配コンセント

ケアコム純正品をご使用ください。

ACアダプター

モードセレクター

お知らせモードが設定できます。


おだやかタイムmiNi 通常セット〔 EKD00-0074 〕 製品構成

セット価格: ¥60,000(税別)

センサーマット EKD00-0051

- 寸法 (mm) : W760×H370
- 重量: 約430g
- 材質: PVC
- ケーブル長: 約1.5m

※メンテナンス用として専用の空気入れ(EKD00-1142)を別途ご用意ください。

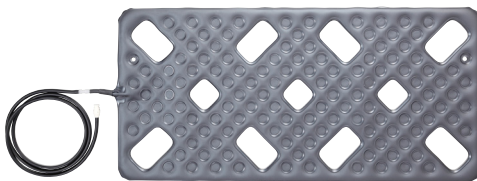

モードセレクター EKD00-064

- 寸法 (mm) : W76×H160×D27
- 材質: ABS
- ケーブル長: 約2m



ACアダプター EKD90-0161

- 入力: AC100V 50Hz/60Hz
- 出力: DC5V 2.2A
- 寸法 (mm) : W48.6×H63.5×D31
- 材質: ABS
- ケーブル長: 約1.8m



オプション品

- 空気入れ EKD00-1142

センサーマットに空気を入れる際に必要です。



価格: ¥4,000(税別)

- 延長チューブ (1m) EKD00-1143

モードセレクターとセンサーマット間の距離を延長する際に使用します。



価格: ¥3,000(税別)

分配コンセント

型名	センサー呼分け	センサー呼出種別※	価格(税別)	対応システム
BB-301WZ-2P/W6P-NC	×	一般	¥16,000	NICSS-R8,R7,R5,R3 CICSS-R5,R3 Well対応Z型
BB-301WZ-2P/W6P-OP1	○	特定1	¥18,000	

※センサーからの呼出を親機やPHSに通知する時の音や表示の種類。

特定1: 特定呼出(トイレ介助・点滴終了) 対応子機の特定呼出1(トイレ介助)と同じ種類。表示メッセージはシステム設定で変更できます(別途有償)

○センサーを使用しない場合の「入切スイッチ」付 ○コード約2m

○壁掛け用ハンガーおよびマグネット(裏面)付

○寸法: W75×H114×D34mm

\*この他にもナースコール子機別にご用意しています。弊社営業担当までお問い合わせください。

お問い合わせは



東京オフィス(代表) 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-13-7 名古路ビル本館1F  
Tel.050-3816-6300(代) Fax.050-3737-9707 ☎0120-047-533

札幌支店 Tel.011-272-1511 仙台支店 Tel.022-272-8781 東京第1支店 Tel.050-3816-6301  
東京第2支店 Tel.042-485-7312 北関東支店 Tel.0270-20-4051 東関東支店 Tel.043-350-3431  
南関東支店 Tel.045-250-5067 金沢支店 Tel.076-210-4255 名古屋支店 Tel.052-731-5361  
大阪第1支店 Tel.06-4964-1895 大阪第2支店 Tel.06-4964-1896 大阪第3支店 Tel.06-4964-1897  
広島支店 Tel.082-568-5951 高松支店 Tel.087-885-3623 福岡支店 Tel.092-714-5345  
熊本支店 Tel.096-375-7090 営業開発グループ Tel.050-3816-6304 CSサービグループ Tel.042-485-7306

ケアコムホームページ <https://www.carecom.jp/> ケアコムはNursing-plaza.comを支援しております。